

# 1. 車椅子

\*貸出している車いすは、多くは寄付でいただいたものなので大事に扱ってください

## (2) 車椅子の開閉方法

手順	車椅子をひらく	車椅子をたたむ
1	駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。	
2	<p>片側ずつ押手を起こし固定します。</p> <p>*ケガをするおそれがあるので押手を起こす際は背折れ金具周辺に手や指を置かない。</p>  <p>背折れレバー スライドピン</p>	<p>片側ずつ、フットプレートを上跳ね上げます。</p> <p>フットプレートを内側に倒した状態のまま折り畳みが出来ません。</p> 
3	<p>左右のアームサポートを持って両側に軽く拡げます。</p> 	<p>片側ずつ、押手を倒します。</p> <p>ケガをするおそれがあるので車椅子を折り畳む際、背折れ金具周辺に手や指を置かない。</p>  <p>背折れレバーを下に押し下げます。</p>
4	<p>シートパイプ部分を押し下げます。</p> 	<p>シートの前方と後方の中央部を同時に引き上げ折り畳みます。</p> 
5	<p>片側ずつ、フットプレートを下ろします。</p> 	